




《1年保証・特許取得》

- ★1回300mlの温水シャワーを使用するピストンポンプ式の鼻洗浄器
- ★《温度・濃度・水圧》の調節が簡単だから痛くない鼻洗浄が可能です
- ★収納ケース&専用洗浄剤30包付
- ★別売で専用洗浄剤『サーレMP』(3g×60包・180包)があります

① - ①



① - ②

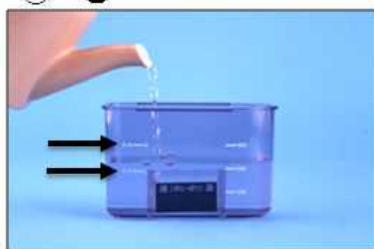

②




③



④



水流切替機能

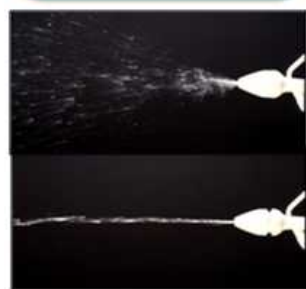

シャワーとストレートがワンタッチで切替可能。やさしく洗いたい方・しっかり洗いたい方などいろいろな方に幅広く対応。

【ハナクリーンEXの使用方法】

- ① - ① ボトル前面の300のラインまで40~42℃のお湯を注ぎます。
- ① - ② 40~42℃のお湯が用意できない場合はCのラインまで水を入れて、Hのラインまで熱湯を注ぎ足していただいても結構です。(約40℃になります)
- ② ボトル前面の温度計で適温(40~42℃)であることを確認します。
お子様の場合は38~40℃くらいが適温です。
- ③ 付属の専用洗浄剤『サーレMP(3g)』を1包溶かして浸透圧濃度を調節します。
※『サーレMP(3g)』は医薬品ではありませんので安心です。
- ④ ノズルを軽く鼻にあて「エー」と声を出しながら交互に両方の鼻を洗ってください。洗浄後は軽く鼻をかんでください。

ノズル着脱機能

ノズルの交換が可能。(交換用は別売)
自分専用のノズルで衛生的。家族で使用するのもオススメ。



【使用上の注意】

1. 使用してはいけない方
 - ★鼻が充分にかめない方
 - ★中耳炎など耳に疾患がある方
2. 使用するのを注意する時(お子様の場合は医師に相談してください)
 - ★鼻づまりのひどい時
 - ★カゼをひいている時
3. 器具はご本人のみが使用してください(感染防止のため)
4. 耳に痛みなどの異常を感じたら使用を中止して医師に相談してください。
5. ご使用の際は説明書をよく読んでから使用してください。

